

Sikring av pasient på bære

.....



Generelt

- Bårereimene skal plasseres tett mot kroppen uten tykk jakke eller dyne mellom reimene og pasient
- Bruk av korrekte reimer i forhold til bære (merket med «Rugged»)
- Plassering av bårereimene er noe ulik fra manuell til el bære
- Bårereimene skal IKKE plasseres hvor man selv synes det er mest praktisk, men følge anmodning fra produsent

Stryker PowerPro XT (EI bære)



- Eksempel på hvor reimene ikke skal plasseres.


Stryker PowerPro XT

- Denne type bære har klistermerker som indikerer korrekte festepunkter for bårereimene



Dette bildet illustrerer korrekt plassering.

Begge hoftebøylene som skal sikre skulderstroppene må være justerbare.
Lår og legg-festene trenger kun 1 justerbar del.

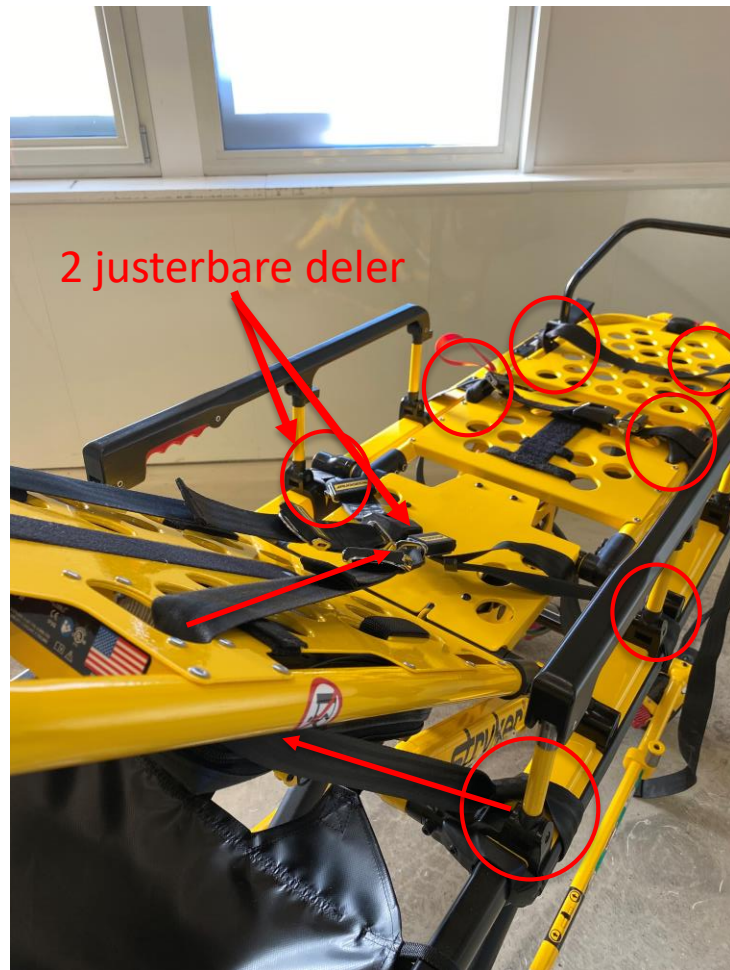

Stryker M-1 (manuell bære)

- Denne typen bære har ikke klistermerker som indikerer plassering av reimene
- Forskjell fra EL bærene; skulderreimene festes her i toppen av ryggbrettet





Kilde:

Power-PRO™ XT Cot (stryker.com)

https://techweb.stryker.com/EMS/Ambulance_Cots/6100/Operations/6100-109-005D.pdf