

## Blodgassapparater i akuttmottak -vedlikeholdsrutiner og romstandard.

### **Blodgassapparat ABL 800: Vedlikeholdsrutiner og romstandard i akuttmottak**

- Det er 2 blodgassapparater ABL 800 plassert i akuttmottak
  - Rom U66R, «lager blodgass» i behandlingseenheten på kirurgisk side
  - Rom U78H, akuttrom ved A2/A3

### **Rutiner**

<b>Blodgassapparat</b> <i>ansvar medisinsk biokjemi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal fra Avdeling for medisinsk biokjemi har ansvar for daglig vedlikehold og drift av blodgassapparat.</li> <li>• Ved feil på apparat, kontakt medisinsk biokjemi på 561049 (fagbioingeniør) eller 561867 (vaktleder). (se oppslag på apparatet)</li> <li>• Varer til blodgassapparatet bestilles av ansvarlig sykepleier etter beskjed fra medisinsk biokjemi, 2 ganger årlig. Varene skal ved ankomst pakkes opp av personal fra medisinsk biokjemi (følgesedlene må ligge ved varene).</li> </ul>
<b>Blodgassapparat</b> <i>ansvar akuttmottak</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukere av blodgassapparat skal kunne bytte papir, avfallsbeholder og renseløsning på apparatet dersom det er behov.</li> <li>• Alle brukere av blodgassapparat skal være registrert på eget ID kort. (kontakt ID kort kontoret eller medisinsk biokjemi (561049))</li> <li>• Alle brukere av blodgassapparat skal ta E-læringskurset arteriell blodgass i læringsportalen.</li> </ul>
<b>Daglig vedlikehold/kontroll</b> <i>ansvar akuttmottak</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at det er rent og orden på rommet og rundt apparatet.</li> <li>• Enhver bruker av apparatet skal fjerne blodsøl og rydde opp etter seg!</li> <li>• Fjern blodsøl fra alle overflater, bruk Virkon.</li> <li>• Vask deretter flater med vann og såpe.</li> </ul>
<b>Ved Behov</b> <i>ansvar akuttmottak</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytt kanyleboks.</li> <li>• Skift «smitte eske».</li> <li>• Etterfyll engangshansker (alle størrelser).</li> <li>• Etterfyll "vattdotter".</li> </ul>
<b>Alle hyller i «Lager blodgass» vaskes to ganger i året, mai og november.</b>	